


Кодирование прибора

Кодирование прибора необходимо выполнять перед первым использованием прибора и затем каждый раз, когда Вы открываете новый флакон с тест-полосками OneTouch® Ultra™.



ШАГ 1

Войдите в режим кодирования.
Прибор должен быть выключен. Введите тест-полоску в прибор. Прибор автоматически включается. На экране появятся все его сегменты. Затем появится номер кода.

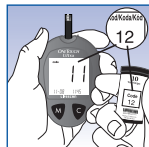


ШАГ 2


Сравните номер кода.
Сравните номер кода на экране прибора с номером кода, указанным на флаконе тест-полосок. Если номер кода совпадает, можно приступить к проведению анализа. Если код не совпадает, перейдите к ШАГУ 3.



ШАГ 3

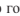
Установка кода.
Нажимайте кнопку «С», пока номер кода не совпадет. После этого появляется символ : прибор готов к проведению проверок и анализов.

Использование памяти прибора

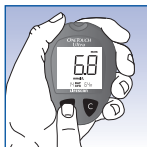


ШАГ 1

Вход в режим памяти.
Прибор должен быть выключен. Нажмите кнопку «М». Когда на экране последовательно отображается средний результат за 14 и 30 дней, это означает, что вы находитесь в режиме памяти.

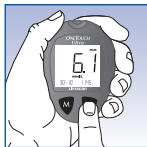

ШАГ 2

Просмотр результатов анализов в памяти прибора.
Через три секунды на экране появится результат последнего анализа с указанием времени и даты его проведения. Нажмите кнопку «С» один раз, и на экране появится результат предпоследнего анализа. Продолжайте нажимать кнопку «С» для того, чтобы просмотреть по порядку результаты последних 150 анализов.

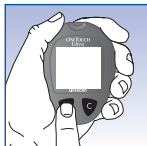


ШАГ 3

Выход из режима памяти.
Для выключения прибора нажмите кнопку «М».


Краткое описание процедуры проведения анализа

Примечание: Вымойте руки теплой водой с мылом и тщательно высушите.

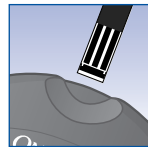


ШАГ 1

Введите тест-полоску.
Убедитесь, что тест-полоска вошла до упора. Прибор включится автоматически.

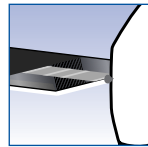


ШАГ 2

Нанесите каплю крови.
Когда на экране появится символ  подведите каплю крови к зоне теста на верхней части тест-полоски и удерживайте ее в таком положении.



ШАГ 3

Заполните контрольное поле.
Убедитесь, что перед началом обратного отсчета контрольное поле заполнено. Если контрольное поле не успевает заполниться до начала отсчета, повторите анализ с использованием новой тест-полоски.

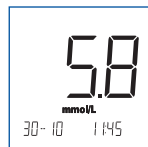


ШАГ 4

Точный результат всего за 5 секунд.

Символы и сообщения на экране прибора




Мигающий значок времени означает, что прибор на время потерял мощность и вошел в режим настройки. При необходимости следует заново установить время и дату. После настройки прибора введите тест-полоску. Если на экране отображаются три тире ---, проведите повторную кодировку прибора. Результаты анализов, хранящиеся в памяти, могут стоять не в том порядке, в котором они были сохранены. **Не доверяйте результатам подсчета среднего значения за 14 и 30 дней.** Позвоните на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53.

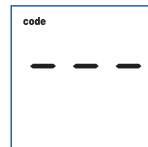

1) На новом приборе не установлен код. Введите код. Или 2) Прибор на короткое время потерял мощность и вошел в режим настройки. Повторно введите номер кода. **Позвоните на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53. Возможна неполадка в работе прибора. Не доверяйте результатам подсчета среднего значения за 14 и 30 дней.**



Результат анализа уровня глюкозы в крови с рекомендацией проверить уровень кетонов.

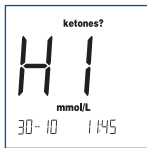

Результат анализа выше 33,3 ммоль/л.




Результат анализа ниже 1,1 ммоль/л.



Слишком низкая температура для проведения анализа. Повторить анализ, когда температура прибора достигнет 6°C.




Слишком высокая температура для проведения анализа. Повторить анализ, когда температура прибора опустится до 44°C.

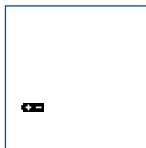


Недостаточный заряд батарейки для проведения анализа. Батарейку следует немедленно заменить.


Сообщения об ошибках

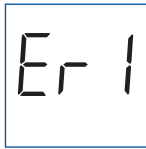


Данная надпись указывает на неполадку в работе прибора. **Не используйте прибор.** Позвоните на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53 для замены прибора.

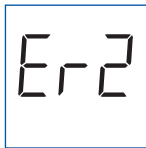

Введена использованная тест-полоска либо прибор неисправен. Повторите анализ, используя новую тест-полоску.

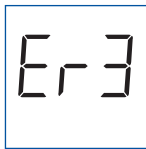


Капля крови или контрольного раствора были нанесены до появления символа . Повторите анализ, используя новую тест-полоску.

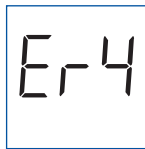

Три возможные причины:

- 1) У вас высокий уровень сахара в крови и анализ проводился при предельных значениях температуры (6-44°C). Повторить анализ в теплом помещении. Или
- 2) Тест-полоска повреждена или извлечена во время проведения анализа. Повторить анализ, используя новую тест-полоску. Или
- 3) Неправильно нанесена капля крови. Повторить анализ, используя новую тест-полоску.

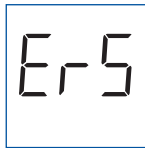

Тест-полоска повреждена или контрольное поле не заполнено. Повторите анализ, используя новую тест-полоску.

Если прибор продолжает выдавать сообщения об ошибке, позвоните на "Горячую линию ЛайфСкэн": (095) 755-83-53. Важные телефонные номера "Горячая линия ЛайфСкэн": (095) 755-83-53.

Лечащий врач

Фармацевт

Врач в Школе диабета

Другие



Milpitas, CA 95035 U.S.A.

RU/QRG/OTU Изд.: 2003/09
© LifeScan, Inc. 2003



AW 06318701A

ONETOUCH® Ultra™

Система контроля уровня глюкозы (сахара) в крови.

Краткая процедура теста*



*Важно: Прежде чем приступить к анализу внимательно прочитайте Инструкцию по пользованию к системе OneTouch® Ultra™. Инструкции по кодированию прибора и проведению анализа крови вы найдете в содержании Инструкции.

